

COM CREAR ASTERICS GRID

1- Al menú de l'esquerra, fem "clic" a crear un usuari **EN LÍNIA**.

SEMPRE en línia si no, no el podrem utilitzar allà on vulguem i que es desin els canvis.

2- Introduïm les dades

3- "Clic" a recordar usuari.

☒ Recordar aquest usuari i definir-lo com fora de línia.

4- "Clic" a **REGISTRAR-SE**.

Registrar-se

Usuaris

- Canviar usuari
- Crear usuari en línia**
- Crear usuari fora de línia

5- Instal·lar-lo com a aplicació a l'ordinador o tauleta.

- "Clic" als 3 punts del *menú superior dret*.
- Cerca EMET, DESA I COMPARTEIX.
- "Click" **INSTAL·LA ASTERICS GRID** del desplegable.

Instal·la l'aplicació



AsTeRICS Grid
grid.asterics.eu


Des de l'aplicació

Free and simple to use app for augmentative and alternative communication (AAC) with offline support, flexible input methods and media access



Instal·la


Cancel·la

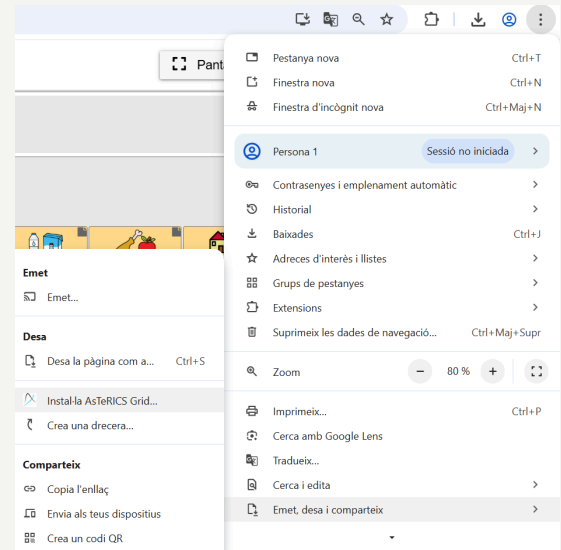

- "Click" **INSTAL·LA** de la pestanya que ens apareixerà a la pantalla. A la tauleta tornem a fer "click" als tres puntets i donem a **INSTAL·LAR**.


6- Escollim un tauler predeterminat i fem "Clic" a **UTILITZA'L**.

- Recomanem el **Global-Core Communicator ARASAAC**.

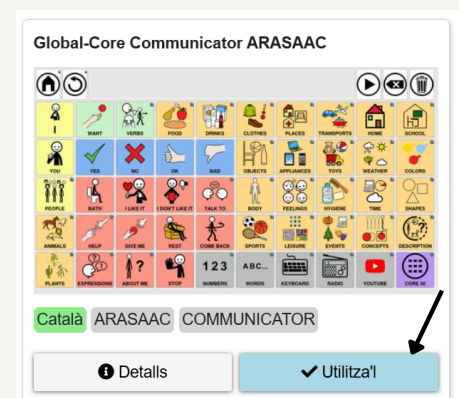

FER SOVINT CÒPIA DE SEGURETAT:

- "Clic" **MÉS** i **GUARDAR CÒPIA DE SEGURETAT**.

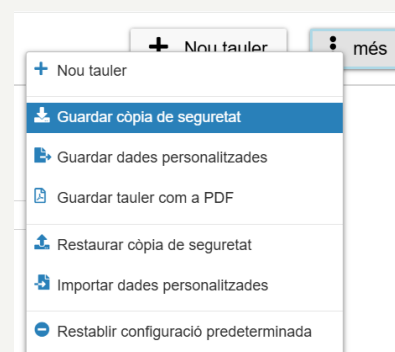

COM EDITAR ASTERICS GRID

1- Al menú de l'esquerra, fem "clic" a crear un usuari **EN LÍNIA**.

SEMPRE en línia si no, no el podrem utilitzar allà on vulguem i que es desin els canvis.

2- Introduïm les dades

3- "Clic" a recordar usuari. ☒ Recordar aquest usuari i definir-lo com fora de línia.



4- "Clic" a **REGISTRAR-SE**.

5- Escollim un tauler predeterminat i fem "Clic" a **UTILITZA'L**.


• Recomanem el **Global-Core Communicator ARASAAC**.

FER SOVINT CÒPIA DE SEGURETAT:

- "Clic" **MÉS** i **GUARDAR CÒPIA DE SEGURETAT**.

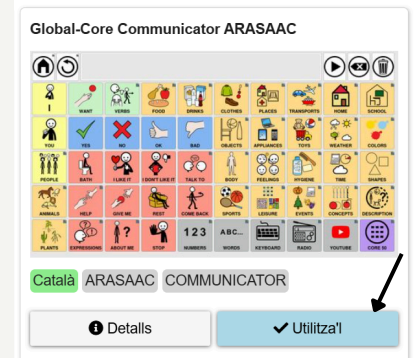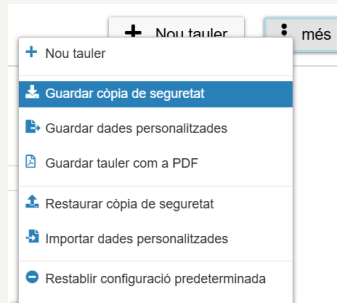

6- "Clic" **CONFIGURACIÓ** al menú de l'esquerra per editar-lo.

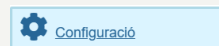

GENERAL: IDIOMA sempre automàtic per poder-lo canviar.

APARENÇA (coses a escollir):

- Pintar el fons o el marc.
- Mode fosc/clar.

TEXT

- Posició superior/ inferior.
- Lletra tipogràfica que volem.
- **TRANSFORMAR EL TEXT A MAJÚSCULES.**
- Mides de lletra i imatges.

Opcions avançades:


- Quantes línies de paraules, distància entre elements al picto i color de lletra.

CEL·LA

- Escollir color de fons de cel·la i tauler.
- Tipus de color: fons/vora.

Opcions avançades:

- Color del marc.
- Gruix del marc, espai entre cel·les i curvatura de la vora.
- Escollir codi de colors.

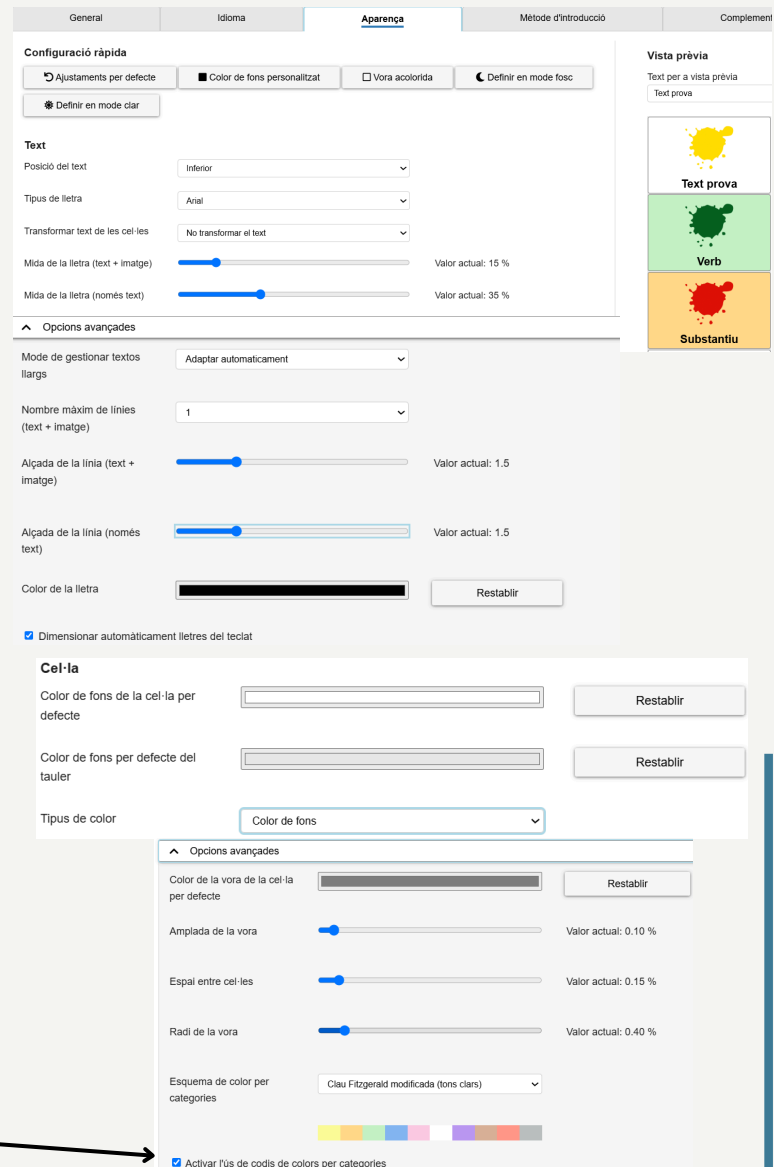

SEMPRE "ACTIVAR ÚS DE CODI DE COLORS PER CATEGORIES".

COM EDITAR ASTERICS GRID

1- “Clic” **GESTIONAR TAULERS** al menú de l’esquerra.


2- Per eliminar taulers:

Fem “clic” als tres punts i a **ELIMINAR**.

3- Per exportar un tauler a l’ordinador i després pujar-lo en un altre perfil:

Fem “clic” als tres punts i a **EXPORTAR**; després “clic” a


✓ Descarregar còpia de seguretat

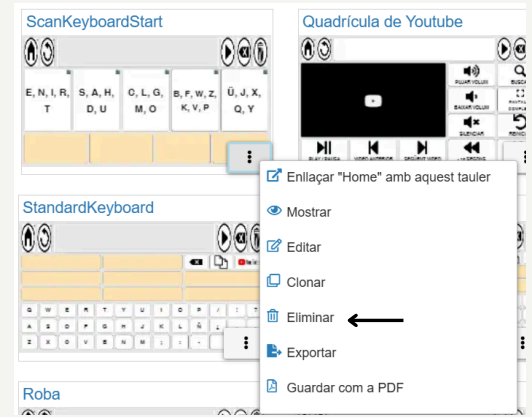

4- Per importar un tauler que tenim guardat a l’ordinador:

Fem “clic” al **MÉS** del menú superior i fem “clic” a **IMPORTAR DADES PERSONALITZADES**, després escollim el fitxer i fem “clic” a

✓ Importar dades

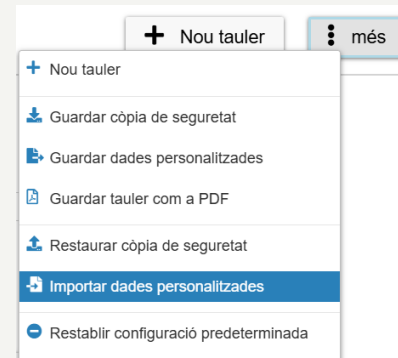

5- “Clic” **INICI** al menú de l’esquerra.


6- “Clic” **EDITAR** al menú superior.

Editar

Quan volem sortir de l’edició: fer “clic” a


Desactivar edició

7- “Clic” **MÉS** i **EDITAR TAULER GLOBAL**. Apareixerà una nova pantalla.

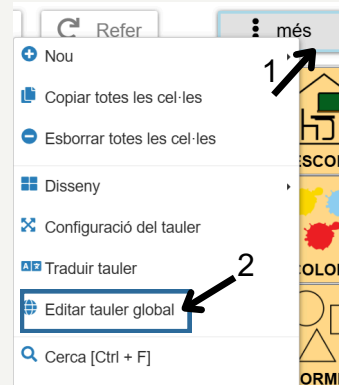


8- Botó dret del ratolí. “Clic” **NOU** i **NOVA CEL·LA**.

Creem les cel·les que volem que apareguin en tots els taulers.

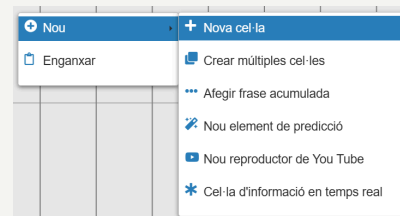


NO DUPLICAR VOCABULARI.

Cal eliminar dels taulers el vocabulari que tenim al **Tauler Global (APAREIX A TOTS ELS PANELLS)**

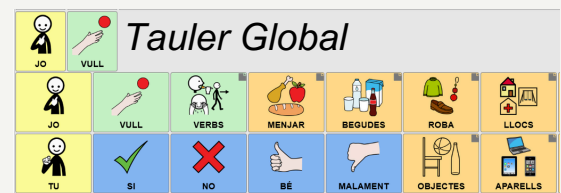

Per **eliminar** una cel·la:

- “Clic” **EDITAR**.
- Ens fiquem sobre la cel·la i fem “clic” al botó dret del ratolí.
- Seleccionem **ELIMINAR** del desplegable.

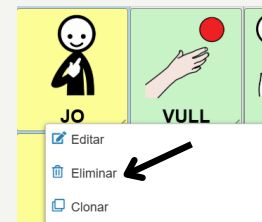

Tenir en compte:


- VOCABULARI **NUCLI**: costat esquerre.
- VOCABULARI **PERIFÈRIC**: costat dret.



COM EDITAR CEL·LES ASTERICS GRID

Per editar taulers des de la pestanya del menú de l'esquerra

Fem "clik" als tres punts i editar.

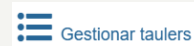

EDITEM CEL·LES

GENERAL:

- Escrivim el text que volem que aparegui.
- Escollim quina categoria és.

Opcions avançades per a dificultats.

- No afegir la paraula a la frase.
- Ficar lletra més o menys gran.
- Escollir el color de fons.
- Escollir el color de la lletra.

Opció AMAGAR CEL·LA si volem que no aparegui al tauler. ☐ Amagar cel·la

IMATGE:

- Escrivim la paraula i escollim el pictograma que volem.

Si volem podem penjar la foto real, fem "clik" a TRIA ARXIU i el pugem de l'ordinador.


FORMES DE PARAULA:

Podem afegir inflexions gramaticals.

ACCIONS:

Surt PRONUNCIAR EL TEXT DE LA CEL·LA com a predeterminada.

- Desplega opcions de "NOVA ACCIÓ" per escollir una de nova i després "clik" AFEGEIX ACCIÓ:
 - "Pronunciar text personalitzat" - canviar l'àudio del picto.
 - "Gravar àudio" - afegir la teva veu.
 - "Navegar a un altre tauler" - anar a un tauler creat. Un cop introduïda decidim el tipus de navegació que volem que faci i a quin tauler volem que vagi amb el desplegable i si volem que s'afegeixi a l'oració o no.

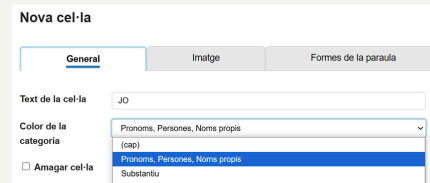


Nova cel·la

General Imatge Formes de la paraula

Text de la cel·la: JO

Color de la categoria: Pronoms, Persones, Noms propis (cap)

☐ Amagar cel·la

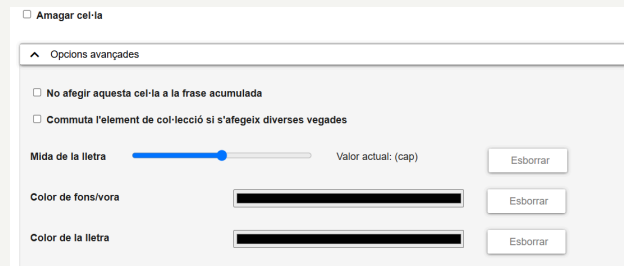

☐ Nova cel·la

Opcions avançades


☐ No afegir aquesta cel·la a la frase acumulada

☐ Commuta l'element de col·lecció si s'afegeix diverses vegades

Mida de la lletra: Valor actual: (cap) Esborrar

Color de fons/vora: Esborrar

Color de la lletra: Esborrar

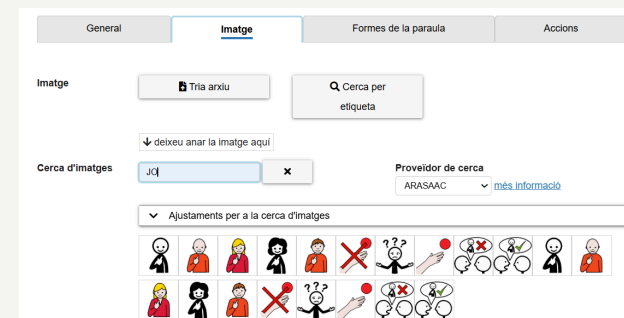


General Imatge Formes de la paraula Accions

Imatge: TRIA ARXIU Cerca per etiqueta

↓ deixeu anar la imatge aquí

Cerca d'imatges: JOI x Proveïdor de cerca: ARASAAC més informació

Ajustaments per a la cerca d'imatges

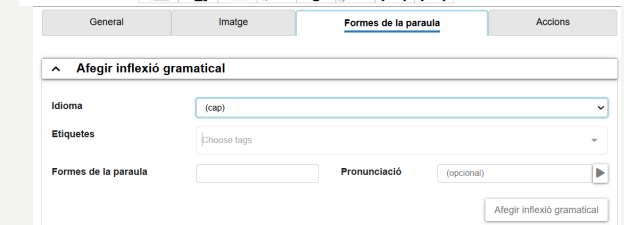


General Imatge Formes de la paraula Accions

Afegir inflexió gramatical

Idioma: (cap)

Etiquetes: Choose tags

Formes de la paraula: Pronunciació: (opcional) Afegir inflexió gramatical

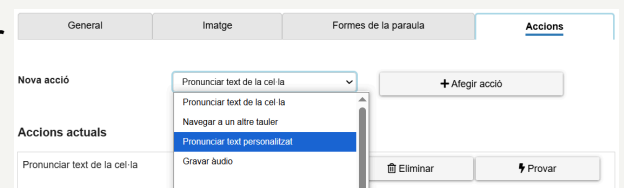


General Imatge Formes de la paraula Accions

Nova acció: Pronunciar text de la cel·la + Afegir acció

Accions actuals: Pronunciar text de la cel·la

Pronunciar text de la cel·la: Eliminar Provar

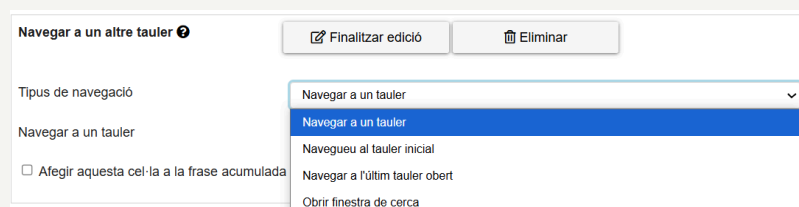

Navegar a un altre tauler ?

Finalitzar edició Eliminar

Tipus de navegació: Navegar a un tauler

Navegar a un tauler: Navegueu al tauler inicial Navegar a l'últim tauler obert Obrir finestra de cerca

☐ Afegir aquesta cel·la a la frase acumulada

pronunciar frase acumulada elemento a elemento